

Masque FM-Px N330

MASQUE NEEOBREATH Notice d'utilisation

Le masque NEEOBREATH est composé des éléments suivants :

- 1 jupe souple avec supports filtres
- 1 bandeau de maintien
- 2 capots de filtres
- 2 filtres

MONTAGE DU BANDEAU

1/ Placez le bandeau face au masque, partie réglage Velcro vers le bas, puis enflez le bandeau de l'arrière vers l'avant sur le premier support filtre.

2/ Enflez ensuite le bandeau sur le second support filtre, de l'arrière vers l'avant. Cette opération est facilitée en enfonçant l'avant du second support filtre vers l'intérieur du masque.

3/ Puis ajustez le bandeau sur le masque.



MONTAGE FILTRES

1/ Placez le filtre dans son capot.

2/ Emboitez l'ensemble sur le support filtre.

3/ Pincez le contour du capot sur son support, les 6 clips doivent être parfaitement verrouillés afin d'assurer l'étanchéité du filtre. **Attention**, les filtres biocides HYGIAFELT sont plus épais et nécessitent une pression plus importante lors de la première utilisation.



REPLACEMENT DES FILTRES

Le démontage du capot doit se faire en déboîtant d'abord les clips latéraux, puis le clip arrière (languette).

Cette opération doit se faire en prenant appui sur le support filtre, et non en tirant sur la jupe du masque car cela risque d'endommager l'ensemble.



DÉMONTAGE DU BANDEAU

Enfoncer l'avant d'un support filtre vers l'intérieur du masque puis, faites glisser le bandeau néoprène vers l'arrière.



ENTRETIEN DU MASQUE ET UTILISATION DES FILTRES



Jupe et supports filtres

Nettoyage avec une solution alcoolique ou antiseptique après chaque journée d'utilisation.

Le modèle santé est stérilisable en autoclave.



Bandeau

Lavable à la main dans un bain alcoolique ou en machine à 60° maximum, si possible après chaque journée d'utilisation.



Filtres FFP3

Durée d'utilisation conseillée : 4 heures.

Non lavable, non réutilisable.



Filtres biocides HYGIAFELT

Durée d'utilisation conseillée : 30 jours.

Préconisation d'entretien : stérilisation 3 minutes dans une casserole d'eau bouillante **une fois par semaine**, puis laisser sécher avant de réutiliser. L'opération doit être plus fréquente si exposition à la poussière.