

**N3EO**

Jupe support étanche pour masque tissus

Jupe support souple pour masque chirurgical ou tissu

La jupe N3EO, en matériau polymère souple, ISO 10993-5 (qualité médicale, stérilisable en autoclave), est un dispositif de confort pour l'utilisation de masques chirurgicaux ou tissu. Elle s'adapte à tous les visages adultes, et apporte les avantages suivants :

- Limite ou élimine la buée dans les lunettes (peu ou pas de remontée d'air vers les lunettes),
- Confère une étanchéité maximum à votre masque (pas de fuite = plus de sécurité),
- Ne bouge pas sur le visage une fois installée (plus besoin de replacer le masque en permanence),
- Permet une meilleure filtration (optimisation de la surface filtrante du masque),
- Évite de contact direct avec le masque (élimine les risques d'allergie).
- Évite au masque de « coller » à la bouche (pas de sensation d'étouffement, meilleure articulation, possibilité d'utilisation de rouge à lèvres).


Notice

Installation d'un masque chirurgical : passez les élastiques au travers des anneaux (1), puis placez les deux côtés du masque sous les languettes latérales (2). Placez ensuite le bord supérieur du masque (côté barrette métallique) sous la languette du nez (3), puis le bord inférieur du masque sous la languette du menton (4). Venez enfin pincer la barrette métallique du masque sur la jupe (5).

ATTENTION : un mauvais contact entre le masque et la jupe au niveau du nez (barrette non ajustée), peut occasionner un passage d'air favorisant la formation de buée dans les lunettes. Si la jupe n'est pas suffisamment appuyée sur le visage, vous pouvez également utiliser en complément, un élastique plat (sur les anneaux de la jupe) afin d'obtenir une étanchéité parfaite.

Installation d'un masque tissu : Les dimensions des masques tissu étant variées, le placement sous les languettes latérales n'est pas automatique. Placez néanmoins la partie supérieure et inférieure du masque sous les languettes (1-2) comme indiqué pour l'installation du masque chirurgical.

Entretien : Avant la première utilisation et après chaque journée d'utilisation, il est recommandé d'effectuer un nettoyage de la jupe avec une solution désinfectante ou avec de l'eau savonneuse.

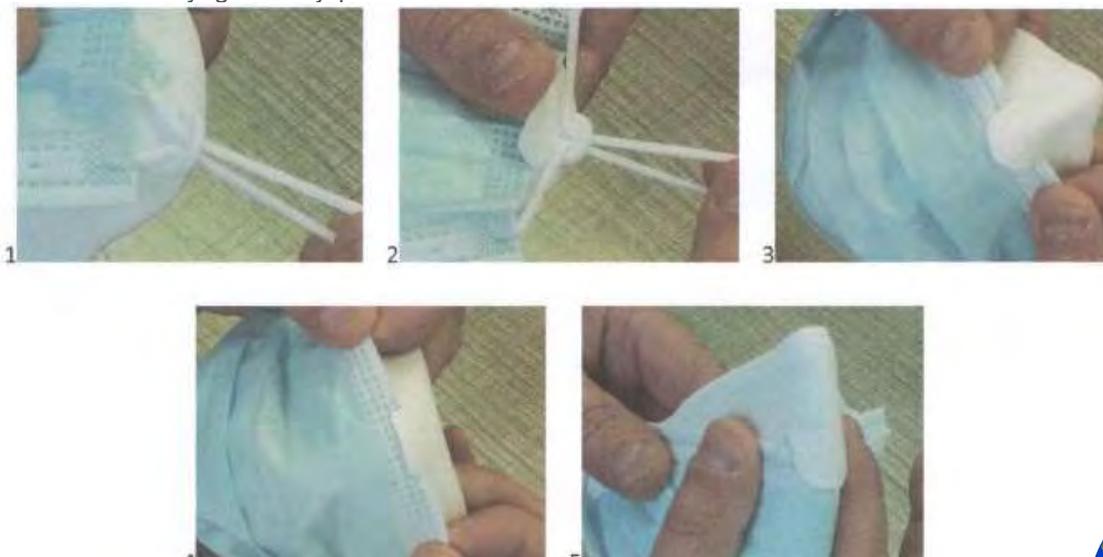

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter par mail : contacts@service-chimie.fr ou par téléphone : 01 64 30 89 22

